



MANUALE D'USO

La vasca che avete acquistato è di semplice utilizzo. Spendete qualche minuto per leggere attentamente queste istruzioni, prima di utilizzare la vostra vasca.

Non dovete in nessun caso esercitare pressione o appoggiarvi alla porta della vasca, se è aperta.

In caso di non utilizzo della vasca lasciate la porta accostata, ma in nessun caso completamente chiusa!

In questo modo vengono preservate le cerniere della porta e assicurata una maggiore durata della guarnizione stagna.

Potete pulire la guarnizione della porta con uno degli spray al silicone presenti in commercio (in media, ogni 3 mesi).

Schiume da bagno, doccia gel, sali, oli essenziali ed essenze non sono in grado di danneggiare la vasca e i suoi componenti. Fate attenzione a non impiegare però schiume o creme da bagno quando utilizzate l'idromassaggio (se compreso nella fornitura). I getti d'aria genererebbero in breve un volume eccessivo di schiuma.

Ad ogni modo è consigliabile, dopo ogni bagno, pulire le superfici plastiche e le parti metalliche con un sapone non aggressivo o un detergente neutro, per evitare la formazione di aloni o di pellicole scivolose. Sciacquate la vasca ed asciugatela con un panno asciutto. Potete prevenire il depositarsi del calcare con un detergente specifico per bagni. Detergenti aggressivi e polveri abrasive non sono adatte alla vostra vasca.

Il baldacchino e la tenda (se compresi nella fornitura) sono entrambi fatti di materiali di semplice manutenzione. La tenda è semplice da rimuovere. Se desiderate lavarla, premete i clips in modo che il pulsante a molla esca lateralmente dal sostegno. Per riposizionare la tenda eseguite l'operazione al contrario. Lavate la tenda a freddo o a 30° in lavatrice o a mano. Non centrifugate, non mettete nell'asciugatrice. Se gli agganci nel binario risultassero difficili da muovere, potete lubrificare il binario con uno dei comuni spray al silicone.