

Dati tecnici

Modifiche tecniche riservate! / Tolleranza di produzione nei tubi +/- 15mm

Dimensione-Modello (senza ruote)	174.10	174.20	174.30	174.40
Peso (kg) / Prodotto ca.	3,0	3,1	3,6	3,7
Taglia	XS	S	M	L
Colore	colorato	colorato	antracite	antracite
Peso corporeo max. (kg)	150	150	150	150
Profondità (mm)	430	430	520	520
Larghezza (mm)	520	520	590	590
Altezza maniglie (mm)	620-710	700-810	680-870	780-970
Regolazione dell'altezza	5-gradi	5-gradi	10-gradi	10-gradi

Dimensione-Modello (2 ruote)	175.10	175.20	175.30	175.40
Peso (kg) / Prodotto ca.	3,3	3,4	4,0	4,1
Taglia	XS	S	M	L
Colore	colorato	colorato	antracite	antracite
Portata max. (kg)	120	120	120	120
Profondità (mm)	400	400	470	470
Larghezza (mm)	500	500	590	590
Altezza maniglie (mm)	620-710	700-810	680-870	780-970
Regolazione dell'altezza	5-gradi	5-gradi	10-gradi	10-gradi

Accessori

Art.-Nr.	Denominazione	Costruzione
169.10.30	Piedino WALK-ON	Plastica, nera
282.53.54	Maniglia d=25mmx300mm	Tubolare morbido
283.02.54	Maniglia d=20mmx250mm	Tubolare morbido
280.10.48	Imbottitura schienale	PUR/Tessuto
270.10.62	Fermaruota WALK-ON	Plastica
430.00.50	Ruota doppia	Plastica/acciaio
853.06.02	Pomello a stella	Plastica/acciaio

Garanzia

Il fabbricante riconosce una garanzia di **2 anni**. Premessa per la validità sono sia le nostre condizioni generali di vendita che un impiego del dispositivo conforme a quanto stabilito. Modifiche al prodotto eseguite autonomamente, senza l'autorizzazione del fabbricante, annullano la garanzia. **La data di consegna sul documento di trasporto indica la decorrenza della garanzia.**

Attenzione!

Potete scaricare le presenti istruzioni (versione GB) dal sito www.rebotec.de.

In tal modo potete stampare e consultare il documento quando necessario.



CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 – 33100 UDINE (Italy)
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
www.chinesport.it

Manuale utente

BA-Nr.: 01.04.008/2016-12

Deambulatori



Numero di serie/Prodotto

WALK-ON
Art.-Nr.: 174. ...

Numero di serie/Prodotto

WALK-ON
Art.-Nr.: 175. ...



Attenzione!

Conservare le presenti istruzioni per utilizzo futuro.

Il numero di serie sulle presenti istruzioni appare anche sull'etichetta fabbricante sul prodotto. In caso di reclamo o richieste fornite il modello, il numero di serie e la versione (BA-Nr.) del presente manuale.

Scopo dell'impiego/avvisi all'utente

I deambulatori sono progettati per persone con limitate capacità di stare in piedi e servono per aumentare la sicurezza nella deambulazione e sono ideali per aiutare ad alzarsi in piedi. Sono adatti all'impiego solo su superficie solida e piana.

Il deambulatore, avendo una struttura in alluminio verniciato a polveri, risulta particolarmente leggero e antiruggine. Le maniglie antiscivolo garantiscono una presa sicura. Il deambulatore è facilmente ripiegabile per il trasporto. Per adattarsi alle dimensioni corporee il maniglione è regolabile in altezza.

Il deambulatore può essere dotato di uno schienale imbottito (accessorio).



Fatevi consigliare dal vostro rivenditore o da un tecnico circa l'impiego del deambulatore e fatevi eseguire le necessarie regolazioni!

Messa in funzione

La completezza della fornitura e la mancanza di difetti del deambulatore vengono verificati in fabbrica. Verificate alla ricezione del prodotto l'eventuale presenza di danni da trasporto.

Aprire il deambulatore

Appoggiate il dispositivo sulle gambe posteriori e spingete il telaio con il maniglione in modo da aprirlo.

Il deambulatore si blocca da solo nella posizione finale.

Regolazione delle maniglie

Per prima cosa rimuovete le due viti a stella. Scegliete poi l'altezza adatta e regolate le maniglie sul foro per vite più vicino. Inserite di nuovo le viti a stella e stringetele.

Richiudere il deambulatore

Estraete entrambi i perni di bloccaggio e sollevate il deambulatore. Adesso potete richiudere il deambulatore.

Sostituzione dei piedini

Un piedino usurato o rovinato deve essere sostituito. Estraetelo dall'estremità del tubolare. Inserire un nuovo piedino e verificare che sia ben stabile al suo posto. Sostituite i piedini sempre **in coppia**, in modo da assicurare la stabilità.



Attenzione! Nel piedino in gomma si trova una piastrina metallica. Evita che l'estremità del tubolare del deambulatore possa urtare per terra. La conseguenza sarebbe altrimenti un danneggiamento del pavimento. Rischio di un incremento del pericolo di caduta a causa di scivolamento.

Cura e manutenzione

Per il telaio in alluminio è sufficiente in genere passare un panno umido e successivamente strofinare con uno asciutto. Le parti in plastica vanno pulite con un detergente comunemente in commercio – fate attenzione alle istruzioni sulla confezione. Attenzione! Non utilizzate prodotti contenenti solventi od olio.

Prima di ogni utilizzo del prodotto, verificatene il buono stato di conservazione. Verificate la stabilità, nella loro sede, dei piedini di gomma o delle ruote. In caso di danni o deformazioni, far revisionare immediatamente il deambulatore. A tal fine, rivolgersi ad un rivenditore specializzato. Impiegare solo ricambi originali REBOTEC.



Fate revisionare il vostro deambulatore, almeno una volta ogni sei mesi, da un rivenditore specializzato.

Reimpiego

Il prodotto è adatto al reimpiego. Il numero di reimpieghi dipende della frequenza e dalle modalità d'uso del prodotto. Prima del reimpiego il prodotto va preparato igienicamente e ne va verificata la sicurezza funzionale.

Durata del prodotto

Se il prodotto viene utilizzato in base alle prescrizioni di sicurezza, la vita del prodotto è di **3 anni**.

La durata effettiva può però variare in base alla frequenza, alla intensità dell'utilizzo e alle condizioni generali.



Avvisi di sicurezza

- Fate attenzione alla portata massima indicata sul prodotto!
- Verificate l'assenza di danni sul dispositivo prima di ogni impiego del dispositivo. In caso di dubbi, non utilizzare il deambulatore.
- Pericolo di caduta! Non sporgetevi troppo in avanti.
- Pericolo di slittamento! Attenzione in caso di impiego di un deambulatore con ruote su pavimenti bagnati o tappeti.
- Quando utilizzate il deambulatore assicuratevi di stare in piedi in maniera sicura.
- In caso di prolungato inutilizzo: fare verificare il deambulatore da un rivenditore autorizzato.
- Utilizzate il maniglione frontale solo per sollevare il deambulatore.
- Per spingere in avanti il deambulatore afferrate solo le maniglie rivestite di gomma.

Fabbricante: **REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH**
Artlandstrasse 57-59 - D-49610 Quakenbrück
Telephone: +49 (0) 5431 94 16-0 - Fax: +49 (0) 5431 94 16-66