

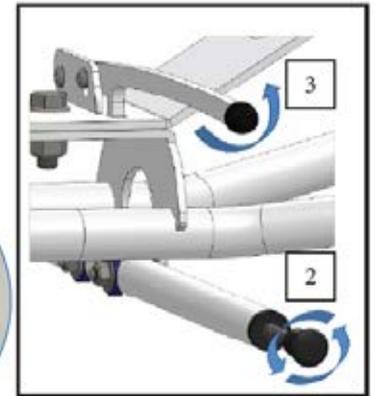
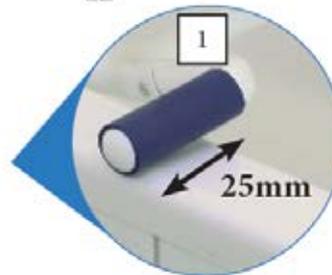


SEDIA GIREVOLE

ISTRUZIONI D'USO

40071 SEDIA GIREVOLE

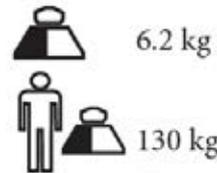

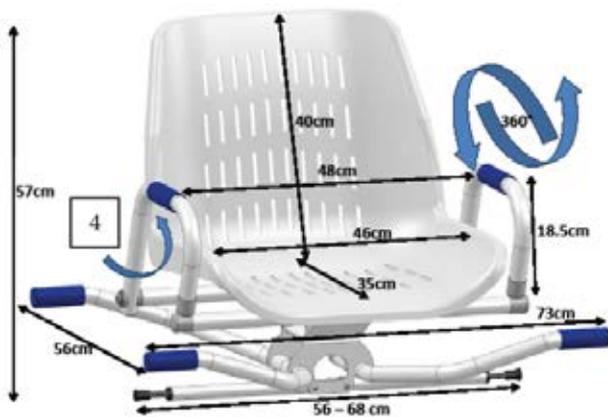

PER FAVORE LEGGETE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO E CONSERVATELE PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE

1. INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Confrontatevi SEMPRE con il vostro medico o con il rivenditore per determinare l'impiego corretto del dispositivo.
- Non conservate all'aperto e non lasciate esposto al sole (attenzione: non lasciare all'interno dell'auto in caso di alte temperature esterne)
- non usare in caso di temperature estreme (oltre 38° C e sotto i 0°).
- Verificare tutte le parti del dispositivo (viti, tubolari, seduta...) e che tutte le viti siano ben strette. Verificare che la seduta giri liberamente su sé stessa e che si blocchi bene in posizione. Se il meccanismo di blocco non funziona bene, sospendete temporaneamente l'uso della sedia e contattate il vostro rivenditore.
- Verificare la presenza di fessure o danni, in particolare sulla seduta di plastica e sui tubolari.
- Usate la sedia bagno solo per l'impiego previsto. Non saliteci sopra in piedi.
- Rispettare SEMPRE la portata massima indicata sull'etichetta del prodotto.
- Non modificate il prodotto, usate solo parti di ricambio originali e fate effettuare le riparazioni da un tecnico competente.
- Dopo aver posizionato la sedia sulla vasca, verificate che sia stabile e ben fissata.
- Prima di iniziare a lavarvi, verificate che la sedia sia ben fissa in posizione e non sia libera di ruotare. Dopo aver ruotato la sedia, assicuratevi che sia di nuovo bloccata e che la leva sia correttamente inserita nel foro.
- Non alzatevi o sedetevi senza prima avere verificato la stabilità della sedia e che questa non possa ruotare liberamente. Muovetevi sempre lentamente quando vi sedete o alzate.
- Fatevi assistere da qualcuno quando usate la sedia bagno.
- Attenzione quando vi alzate dalla sedia, il pavimento potrebbe essere bagnato e scivoloso!
- Non sporgetevi dalla sedia con il peso corporeo, potreste perdere l'equilibrio
- Se non impiegate la sedia per un lungo periodo, prima di rimetterla in uso fatela ispezionare da un tecnico qualificato.
- Non conservare all'esterno, la sedia è pensata per un impiego in casa.
- Verificate la sedia prima di iniziare ad utilizzarla. Se avete dei dubbi, contattate il vostro medico o il rivenditore.

2. INSTALLAZIONE

Il dispositivo è progettato per fornire aiuto ad entrare ed uscire dalla vasca da bagno. È pensato per essere posto sopra la vasca e ruotare di 360°, bloccandosi nella posizione utile grazie ad una leva di semplice utilizzo. La sedia rotante si adatta a gran parte delle vasche standard con dimensioni di ca 70 cm.

Attenzione! la sedia è fornita di fori per far scorrere via l'acqua. In alcuni rari casi (es. prolasso rettale) questi fori potrebbero intrappolare i genitali o il prolasso, causando dolore e ferite gravi, come tagli, lacerazioni o contusioni testicolari. In caso di dubbio, contattate il vostro medico o il rivenditore per determinare un impiego sicuro del dispositivo. Potete anche posizionare del materiale sul sedile per evitare che parti anatomiche o pelle passino attraverso i fori.

Solo uno specialista può regolare il dispositivo e spiegare come utilizzarlo. Chiedete ad un tecnico di chiarirvi come usare il prodotto e assicuratevi di avere capito bene la spiegazione. In caso di dubbi, chiedete nuovamente.

INSTALLAZIONE

I prodotti sono consegnati montati e pronti all'uso.

1. Posizionare il sedile sopra la vasca. Almeno 25 mm di ciascun braccio antiscivolo blu deve appoggiare sui bordi piani della vasca. Verificate la stabilità, la sedia non deve essere instabile (1).
2. Assicurate stabilmente la struttura girando le due viti di bloccaggio (2) contro il bordo vasca. Verificate la stabilità della struttura, non stringete troppo le viti.
3. Sollevate la leva di bloccaggio (si trova sotto il sedile) per sbloccare e ruotare la seduta (3). Verificate che la leva funzioni correttamente in ogni foro di bloccaggio.
4. Entrambi i braccioli sono ribaltabili (4).

UTILIZZARE LA SEDIA BAGNO ROTANTE

1. Sollevate la leva e ruotate il sedile verso l'utente, bloccate poi il sedile in posizione abbassando la leva e continuando a ruotare il sedile fino a che non si blocca.
2. Trasferite con attenzione l'utente sul sedile, facendo attenzione al pavimento umido e scivoloso.
3. Sbloccate il sedile sollevando la leva.
4. Sollevate le gambe sopra il bordo della vasca, una alla volta o entrambe assieme, mentre ruotate lentamente il sedile.
5. Quando la persona è in posizione per il bagno bloccate il sedile e assicuratevi che non possa più muoversi liberamente.
6. Per uscire dalla vasca, sbloccate il sedile (sollevando la leva) e ruotatelo lentamente mentre sollevate le gambe dell'utente oltre il bordo vasca, una alla volta o entrambe assieme.
7. Bloccate il sedile quando la persona è rivolta verso il lato aperto della vasca. Ora la persona può lentamente mettersi in piedi, con molta attenzione.

3. PULIZIA

Il sedile doccia deve essere pulito regolarmente, con un detergente non aggressivo e un panno morbido.

4. MATERIALI

Il prodotto è fatto di tubi in acciaio (non arrugginisce) trattati contro la ruggine e verniciati a polveri. Il sedile plastico è fatto di polipropilene e di vari componenti plastici.

5. SMALTIMENTO

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in base alla normativa nazionale in vigore.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza vasca: da 56 a 68 cm (interno) / 73 cm (esterno)
 Il prodotto ha una garanzia di 2 anni, dalla data di acquisto, che copre tutti i difetti di fabbricazione. Il prodotto è biocompatibile, Test: DIN-EN-ISO 9999 (08/98): 093303

FABBRICANTE

SNC HERDEGEN

7 Rue Eugène Freyssinet, F- 77500 Chelles

RIVENDITORE

CHINESPORT SPA

Via Croazia, 2 - 33100 Udine (UD) Italia

Tel. +39 0432 621 621 / Fax +39 0432 621 620