

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE

Sedia girevole per vasca con seduta, schienale ed imbottiture dei braccioli in poliuretano morbido. Schienale estraibile. Braccioli ribaltabili. Appoggi per vasca ricoperti in poliuretano morbido. Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta. Possibilità di regolazione in larghezza.

MATERIALI COMPONENTI

Struttura e braccioli	Alluminio
Seduta, schienale, imbottiture braccioli e coperture appoggi per vasca	Poliuretano morbido

DATI TECNICI

Dimensioni della seduta	33 x 40 cm
Altezza dello schienale	37 cm
Peso	7.5 kg
Portata	120 kg

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

PRECAUZIONI

Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento del dispositivo sui bordi della vasca. Controllare lo stato delle coperture in poliuretano morbido degli appoggi per vasca. Assicurarsi della stabilità della sedia verificando che la leva di bloccaggio posta sotto la seduta sia debitamente fissata nel foro della posizione desiderata. Accertarsi del corretto fissaggio dello schienale, dei braccioli e degli appoggi laterali. Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità di deambulazione.

MODALITA' DI UTILIZZO

Procedere alla regolazione in larghezza e sistemare la sedia sulla vasca in modo che i gli appoggi laterali del dispositivo siano correttamente posizionati sui bordi della vasca.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente il funzionamento dei meccanismi di rotazione e la corretta tenuta delle clip di bloccaggio degli appoggi laterali, dei braccioli e dello schienale.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.



ISTRUZIONI PER L'USO

SEDIA GIREVOLE PER VASCA CON IMBOTTITURE IN POLIURETANO AB-33



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Made in Taiwan



via Ludovico D'Aragona, 11 - 20132 Milano (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it